


LE DIFFUSEUR
PORTABLE
Baxter

Guide de remplissage et de préparation



INFUSOR

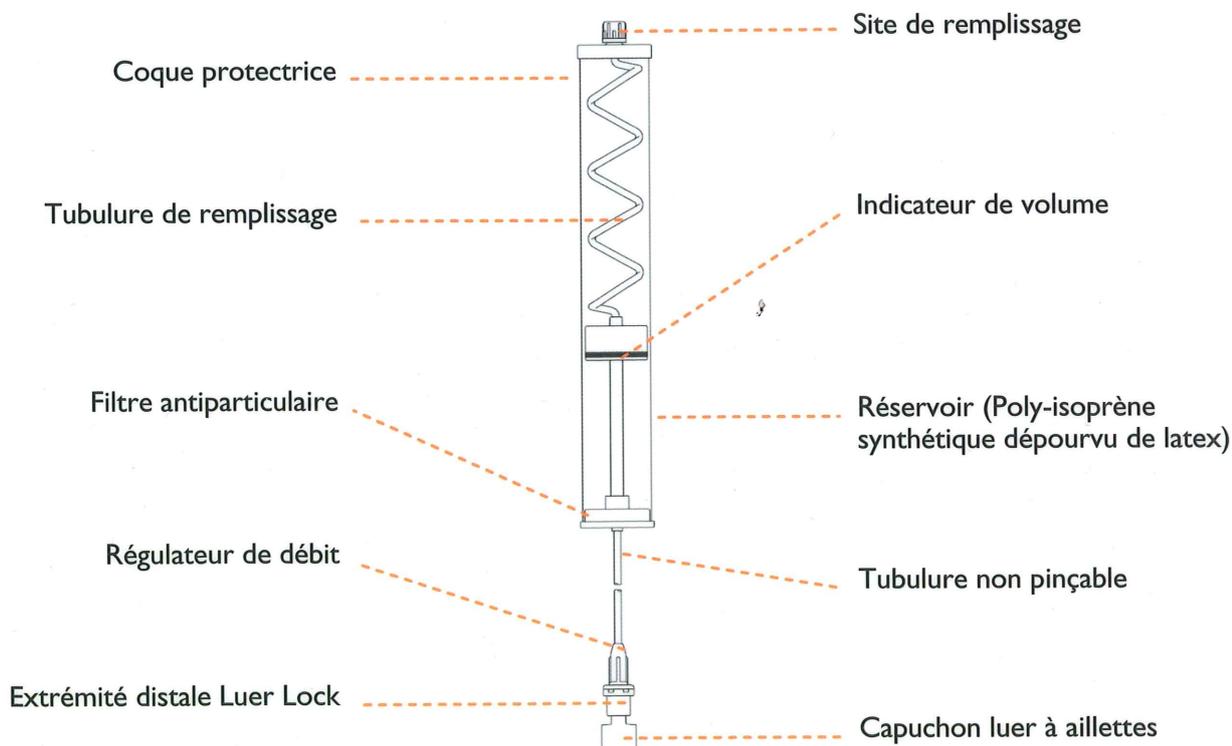


Utiliser une technique aseptique




1 Enlever la bande de papier maintenant la tubulure d'INFUSOR.



2 Enlever le bouchon à ailettes de l'embout Luer terminal et le mettre de côté.

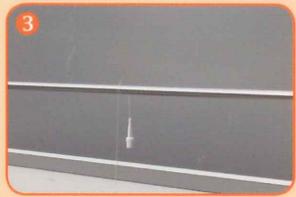

3 Elever la partie distale de la tubulure d'INFUSOR.

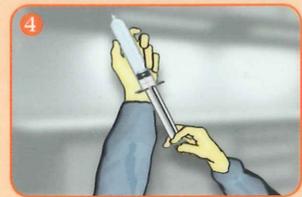

4 Enlever tout l'air de la seringue de 50 ml remplie de solution médicamenteuse. Oter l'aiguille de la seringue.



5 Oter le bouchon du site de remplissage d'INFUSOR et le mettre de côté. Connecter la seringue sur le site de remplissage.



6 Poser l'ensemble seringue-INFUSOR verticalement sur le plan de travail. Tenir l'ensemble par les ailettes ou le corps de la seringue. Sans toucher le corps d'INFUSOR, exercer lentement une pression sur le piston de la seringue pour remplir le réservoir.



7 Déconnecter la seringue du site de remplissage. Remettre le bouchon du site de remplissage.



8 Attendre que quelques gouttes perlent au niveau du Luer terminal. Vérifier l'absence de bulles d'air dans la tubulure.




9 Replacer le bouchon à ailettes




10 Si INFUSOR ne fonctionne pas, procéder à une purge forcée.


Purge forcée

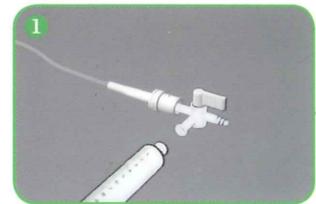

1 Connecter un robinet 3-voies ou un adaptateur Luer à l'extrémité distale de la tubulure d'INFUSOR.

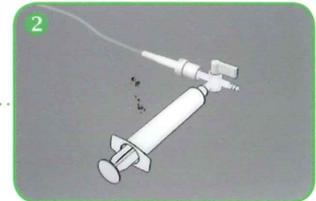

2 Connecter une seringue de 10 ml à l'autre côté du robinet 3-voies ou de l'adaptateur Luer. S'assurer que le robinet 3-voies est en position ouverte.

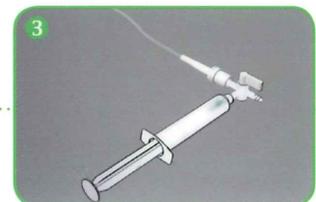

3 Tirer sur le piston de la seringue afin de créer un vide. Maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la solution apparaisse dans la seringue.



4 Vérifier que la tubulure est totalement purgée en observant la solution s'écouler. Confirmer visuellement l'absence de bulles d'air dans la tubulure. Replacer le bouchon à ailettes sur l'embout Luer terminal.



Ne pas réutiliser INFUSOR